

HansaGT Medical GmbH

Tochtergesellschaft der Deutsche HansaGT GmbH



HansaGT Medical GmbH
Tochtergesellschaft der Deutsche
HansaGT GmbH

Hardenstr. 51 • 20539 Hamburg
USt-ID Nr. DE 315274646
Steuer-Nr.: 46/714/04314
Handelsregister HRB 148912

Bankverbindung (DE)
IBAN: DE86 3002 0900 5360 5056 47
BIC CMCIDEDO
Targobank Hamburg

Tel: +49 (0)40 309 392 58
Fax: +49 (0)40 309 392 56

www.hansagt.de
www.hansagt24.com
bestellung@hansagt24.com

BfArM Test-ID AT046/20

Produktbezeichnung

Joysbio Coronavirus Antigen
Schnelltest

Art.-Nr.

10011

Einheit

20 Tests pro Packung

Lagertemperatur

2-30 °C

Probenart

Nasenabstrich

Testort

Point of Care (ohne Gerät)

Test Type

Qualitativ

Auslesezeit

15 - 20 Minuten

Anwender

Medizinisches Fachpersonal

Sensitivität

98,13%

Spezifität

99,22%

Zuverlässigkeit

98,98%

VORTEILE

BfArM gelistet und somit erstattungsfähig **1**

hochpräzise Ergebnisse
nach 15 Minuten **2**

Einfache Handhabung ohne
zusätzliches Analysesystem **3**

vorderer Nasenabstrich
(bis 2,5 cm tief in die Nase) **4**

Aufbewahrung bei Raumtemperatur **5**

LIEFERUMFANG

20 Testkarte

20 Trockenmittel

20 Puffer (350µL/Flasche)

20 Extraktionsreagenzglas

20 Tupfer

1 Gebrauchsanweisung



JOYSBIO

CORONAVIRUS

ANTIGEN SCHNELLTEST


Probenentnahme

Führen Sie bitte den Tupfer in ein Nasenloch des Patienten etwa 2,5 cm tief ein und drehen Sie den Tupfer fünfmal. Wiederholen Sie bitte den Vorgang mit demselben Tupfer für das andere Nasenloch.

Hardenstr. 51 • 20539 Hamburg
USt-ID Nr. DE 315274646
Steuer-Nr.: 46/714/04314
Handelsregister HRB 148912


TESTVERFAHREN

- 1 Schrauben Sie die Pufferflasche ab und drücken Sie den gesamten Puffer in das Extraktionsreagenzglas.
- 2 Führen Sie den Tupfer in den Boden des Extraktionsröhrchens ein. Drehen Sie bitte den Tupfer etwa 20 Sekunden lang. Schließen Sie bitte die Kappe und drücken die Düsenkappe fest auf das Extraktionsröhrchen mit der verarbeiteten Probe. Mischen Sie es gründlich.
- 3 Drücken Sie das Extraktionsröhrchen leicht und lassen Sie drei Tropfen der verarbeiteten Probenlösung in das Probenloch der Testkarte fallen.
- 4 Beobachten Sie das Ergebnis innerhalb von 15 bis 20 Minuten. Nach 20 Minuten ist das Ergebnis ungültig.

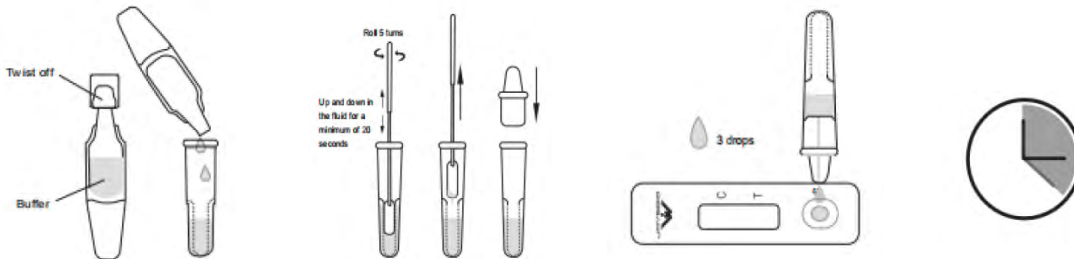

TESTERGEBNIS

- 1 Zwei Linien sind vorhanden.
Eine farbige Linie sollte sich im Bereich der Kontrolllinie (C) befinden.
Eine farbige Linie erscheint im Bereich der Testlinie (T).
- 2 Nur eine farbige Kontrolllinie ist vorhanden.
Negative Ergebnisse sind präsumptiv.
- 3 Die Kontrolllinie erscheint nicht.

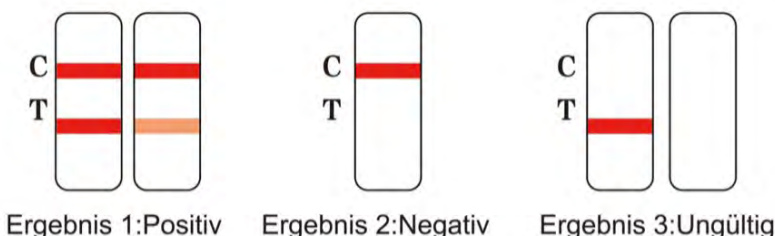

HansaGT Medical GmbH
Tochtergesellschaft der Deutsche HansaGT GmbH

Bankverbindung (DE)
IBAN: DE86 3002 0900 5360 5056 47
BIC CMCIDEDO
Targobank Hamburg

Tel: +49 (0)40 309 392 58
Fax: +49 (0)40 309 392 56

www.hansagt.de
www.hansagt24.com
bestellung@hansagt24.com

KLINISCHE BEWERTUNG

PCR	Positiv	Negativ	Gesamt
Positiv	105	3	108
Negativ	2	382	384
Summe	107	385	492

JOYSBIO CORONAVIRUS ANTIGEN SCHNELLTEST